

**AkusTone alert**

krople do uszu

**Instrukcja używania**

Wyrób medyczny **AkusTone alert** zalecany jest w stanach zapalnych ucha zewnętrznego (*Otitis externa*) objawiających się bólem, świądem i zaczerwienieniem oraz związanych np. z nieprawidłową higieną, obecnością czopa woskowinowego lub tzw. uchem pływaka.

**AkusTone alert** stwarza w zewnętrznym przewodzie słuchowym warunki hamujące rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów, takich jak bakterie i grzyby, będących głównymi przyczynami zapalenia ucha zewnętrznego. Dodatkowo w wyrobie zastosowane zostały olejki zapachowe: geraniowy i z drzewa herbacianego, będące jednocześnie naturalnymi konserwantami zapobiegającymi rozwojowi drobnoustrojów. Zawarty w kroplach glicerol, dzięki właściwościom nawilżającym i powlekającym łagodzi podrażnienia, a także zmiękcza naciskający na ścianki przewodu słuchowego czop woskowinowy, ułatwiając jego usunięcie. **AkusTone alert** może być również stosowany zapobiegawczo u osób z tendencją do nawracających infekcji zewnętrznego przewodu słuchowego związanych z częstym lub długim kontaktem z wodą (tzw. ucho pływaka).

**AkusTone alert:**

- zalecany jest w stanach zapalnych ucha zewnętrznego (*Otitis externa*), objawiających się:
  - bólem,
  - świądem,
  - zaczerwienieniem,
- stwarza warunki hamujące rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów,
- nawilża i łagodzi podrażnienia,
- do stosowania zapobiegawczego u osób z tendencją do występowania tzw. ucha pływaka.

**Zastosowanie i sposób postępowania z wyrobem:**

Wyrób przeznaczony jest do miejscowego stosowania w przewodzie słuchowym zewnętrznym przez dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.

W stanach zapalnych ucha zewnętrznego, o ile lekarz nie zaleci inaczej: 1-2 krople 3-4 razy dziennie. W celu zapobiegania infekcjom zewnętrznego przewodu słuchowego (tzw. ucho pływaka): 1-2 krople po kąpielach w basenie.

Kroplomierza (końcówki aplikatora) nie należy wsuwać głęboko do ucha żeby nie uszkodzić narządu słuchu.

**Sposób aplikacji wyrobu:**

1. Energicznie wstrząśnij wyrób przed użyciem.
2. Przechyl głowę lub połóż się na boku tak, aby ucho było zwrócone ku górze, następnie delikatnie pociągnij płatek ucha (dolną część małżowiny usznej) w kierunku od szyi.
3. Naciskając na butelkę, wpuść do przewodu słuchowego 1-2 krople wyrobu i pozostań w przyjętej pozycji przez 2-3 minuty. Ze względów higienicznych w trakcie aplikacji staraj się nie dotykać ucha kroplomierzem.

4. Po wyprostowaniu się z ucha wydostanie się nadmiar płynu, który należy wytrzeć czystą chusteczką.
5. Po użyciu dokładnie zakręć butelkę.  
[grafika]

**Skład:** woda oczyszczona, glicerol, polisorbat 80, olejek z drzewa herbacianego, chlorek cetylopirydyniowy, kwas octowy, olejek geraniowy, octan sodu.

**Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej, otwartych ran lub gdy w uchu znajduje się ciało obce a także równocześnie z innymi miejscowo działającymi produktami do uszu. Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej. Nie należy podawać wyrobu do ucha z założonym aparatem słuchowym. Wyrób należy aplikować co najmniej na godzinę przed włożeniem aparatu słuchowego.

Każdy silny ból ucha jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem. Ból ucha u dzieci należy zawsze skonsultować z lekarzem. Wyrób jest przeznaczony do stosowania doraźnego. Jeżeli po upływie 2 dni nie nastąpi poprawa lub w okresie do 2 dni od rozpoczęcia stosowania pacjent czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza. Wystąpienie dodatkowych objawów takich jak gorączka, wyciek z ucha lub podejrzenie obecności ciała obcego w przewodzie słuchowym jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.

**Miejsce i warunki przechowywania:**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.



Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 133/151,  
95-200 Pabianice.

**Data wydania instrukcji:** 06/2020

**Oznaczenie symboli na opakowaniu:**

	nr serii
	termin ważności
	zajrzyj do instrukcji używania
	ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania
	wytwórca