

SORA med

Wyrób medyczny do zwalczania wszawicy

Instrukcja używania

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania, ponieważ zawiera ona istotne informacje dotyczące stosowania wyrobu.

SORA med to wyrób medyczny wskazany do zwalczania wszawicy głowowej w przypadku zasiedlenia skóry głowy i włosów przez wszy ludzkie (*Pediculus humanus*).

Zawarty w wyrobie dimetykon (olej silikonowy) powleka wszy oraz ich jaja/gnidy okluzyjną warstwą, uniemożliwiając wymianę gazową. Prowadzi to do zablokowania procesu oddychania i wydalania wody przez wszy i ich larwy oraz zaburzenia wzrostu i dojrzewania gnid, w wyniku czego obumierają a cykl życiowy pasożyta zostaje przerwany. Dodatkowo wytworzona na powierzchni włosów warstwa, przeciwdziała przytwierdzeniu gnid i ułatwia ich wyczesanie.

Ze względu na nietoksyczny mechanizm działania, nie dochodzi do rozwoju oporności pasożytów na wyrób a także może on być stosowany bez ograniczeń wiekowych, również przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Potrójne działanie:

- zaburza proces oddychania wszy i gnid,
- niszczy wszy i larwy, blokując wydalanie przez nie wody,
- zmniejsza przyczepność gnid do włosów.

Skład: dimetykon (olej silikonowy) 100%.

Wyrób nie zawiera barwników, środków zapachowych ani konserwujących.

Sposób postępowania z wyrobem:

W celu skutecznego pozbycia się wszy i ograniczenia możliwości ponownego zarażenia wszawicą, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Zastosowanie wyrobu medycznego SORA med

➤ Ilość produktu

- Należy indywidualnie ocenić potrzebną ilość produktu, pozwalającą na całkowite zwilżenie skóry głowy i włosów. Wymagana ilość uzależniona jest zarówno od długości jak i gęstości włosów.
- W tabeli znajdują się informacje na temat ilości wyrobu, potrzebnych do zwilżenia włosów w zależności od ich długości. W przypadku bardzo długich lub gęstych włosów może być konieczne zastosowanie większej ilości produktu.

Włosy krótkie (do uszu lub krótsze)	25 – 50 ml
Włosy średnio-długie (do ramion)	50 – 75 ml
Włosy długie (poniżej linii ramion)	75 – 100 ml

- W celu ułatwienia dawkowania wyrobu, na etykiecie na butelce znajdują się oznaczenia w postaci linii. Objętość płynu pomiędzy podziałami odpowiada ok. 25 ml produktu.

➤ Sposób postępowania

1. Przed zastosowaniem wyrobu, należy osłonić ramiona np. za pomocą ręcznika.
2. Wyrób należy nałożyć na suche włosy a następnie dokładnie wmasować, aż do całkowitego zwilżenia skóry głowy i włosów. Szczególną uwagę należy zwrócić na okolice karku i za uszami. W przypadku włosów długich i średnio-długich, wyrób najlepiej aplikować na kolejne pasma.
3. Wyrób należy pozostawić na włosach na co najmniej 10 minut.
4. Należy dokładnie wyczesać włosy za pomocą dołączonego do opakowania grzebienia, w celu całkowitego usunięcia wszy i gnid. W trakcie wyczesywania grzebień należy oczyszczać za pomocą chusteczki higienicznej.
5. Po usunięciu wszystkich gnid, włosy należy dokładnie umyć.
6. W celu upewnienia się, że wszystkie pasożyty zostały usunięte, włosy należy regularnie kontrolować przez okres co najmniej 10 dni. W przypadku ponownego stwierdzenia obecności wszy, zabieg należy powtórzyć.

Przeciwdziałanie ponownemu zarażeniu wszawicą

- Należy sprawdzać obecność wszy i gnid u wszystkich domowników lub osób narażonych na kontakt z pasożytem (np. w klasie, grupie) przez kolejne 10 dni.
- W przypadku stwierdzenia obecności pasożytów należy zastosować leczenie przeciwko wszawicy.
- Ubrania, pościel, ręczniki, koce używane przez zarażoną osobę, należy wyprać w temperaturze przynajmniej 60°C.
- Przedmioty nie nadające się do prania lub wrażliwe na wysoką temperaturę, należy umieścić w plastikowym worku i pozostawić na co najmniej 3 tygodnie lub mrozić w temperaturze od - 15°C do - 18°C przez okres min. 24 godzin.
- Produkty służące do pielęgnacji włosów (grzebień, szczotka itp.) należy zanurzyć na 10 minut w gorącej wodzie o temperaturze 60°C.
- Należy dokładnie odkurzyć dywany, obicia mebli i tapicerkę w samochodzie, a następnie wyrzucić worek z odkurzacza.

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na dimetykon. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy przerwać stosowanie wyrobu i skonsultować się z lekarzem. Wyrób może powodować podrażnienia skóry objawiające się świądem lub zaczerwienieniem. Zwykle są one łagodne i mają charakter przejściowy.

Produkt do stosowania wyłącznie zewnętrznego na owłosioną skórę głowy. Nie stosować do oczu, nosa, uszu lub jamy ustnej. Wyrób może powodować łagodne podrażnienia oczu. W sytuacji przypadkowego dostania się do oczu lub ust należy obficie przemyć je wodą. Jeśli pomimo to podrażnienie utrzymuje się, należy zgłosić się do lekarza lub okulisty. W przypadku dzieci poniżej pierwszego roku życia zastosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów nie wymienionych w instrukcji, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie są znane interakcje wyrobu z lekami lub innymi wyrobami medycznymi jednak nie należy stosować produktu łącznie z innymi w tym samym czasie. W przypadku rozlania należy zachować ostrożność, żeby uniknąć poślizgnięcia.

Miejsce i warunki przechowywania:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności umieszczonej na etykiecie butelki i na kartoniku.



Data wydania instrukcji: 01/2019



Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice.

Warto wiedzieć

- Wszy ludzkie różnią się rozmiarem w zależności od wieku. Mogą mieć od 0,5 mm (wielkość wydrukowanej kropki) do 3 mm długości (ziarno sezamu) i być trudne do zauważenia, ponieważ potrafią dostosowywać swoje zabarwienie do koloru otoczenia.
- Wszy odżywiają się krwią, czemu może towarzyszyć swędzenie skóry.
- Wszy ludzkie nie mogą skakać, latać ani pływać, natomiast mogą być przenoszone przez bezpośredni kontakt głowa-głowa lub poprzez wspólne używanie grzebieni, szczotek do włosów, nakryć głowy, ręczników czy też pościeli.
- Wszy ludzkie bytują na ludziach bez względu na to czy włosy są czyste czy brudne.
- Samice wszy składają od 3 do 5 jaj dziennie, z których po 7 dniach wylęgają się nowe osobniki. Z tego powodu ważne jest dokładne wyczesanie wszystkich jaj/gnid za pomocą gęstego grzebienia oraz kontrola obecności pasożytów przez kolejne 10 dni.
- W przypadku zaobserwowania wszawicy u jednej osoby, istotne jest żeby sprawdzać obecność wszy u wszystkich domowników a także w całej grupie narażonej na kontakt z pasożytem.

Oznaczenie symboli na opakowaniu:

	nr serii,
	termin ważności,
	zajrzyj do instrukcji używania,
	ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania,
	chronić przed wilgocią,
	wytwórca.